

**BioAcu
BioCombi
BioMulti
BioRadiance**

**Klinisk
och
Teknisk
manual**



Stephan Tomac

Sveavägen 49, 5tr.

113 59 STOCKHOLM

Tel.: 0706 83 04 10 – 08 512 94 071

<http://www.correctus.se> e-mail: info@correctus.se

Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och utgör inget bindande åtagande från Stephan Tomac. Den programvara som beskrivs, ställs till förfogande under licensavtal eller sekretessavtal. Programvaran får endast användas eller kopieras i enlighet med avtalets villkor. Det är i lag förbjudet att kopiera programvaran till medium som inte uttryckligen specificerats i licensavtalet eller i sekretessavtalet. Ingen del av denna handbok får återges eller överföras i någon form eller på någon sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Stephan Tomac.

Licens för denna manual har givits till – se namnet på framsidan – och kan inte överlåtas till annan utan skriftligt medgivande av © Copyright's innehavare för denna manual.

© Copyright 1970-2014. Stephan Tomac. Med ensamrätt.

BioHarmonizer, BioAcu, BioCombi, BioMulti, BioChampion, BioRadiance, BioCoordinator, BioComp1500, MegaScan16, BioAccess2000, SYMSOL, Acu365, NUTRItest, Correctus, CorrectusBack är varumärke som tillhör Stephan Tomac. Stephan Tomac är grundaren av BioHarmonizer Konceptet.

©Copyright 1970-2006. Stephan Tomac.

Rätten för produktspecifikationer och prisändring förbehålles.

INNEHÅLL

Klinisk manual	2
Enligt akupunktur traditionen.....	2
Behandlingsprincip	2
Behandlingsområde (nivå)	2
Etiologisk nivå:	2
Avbildningszon (reflexbehandling).....	2
Symptombehandling.....	2
Punkternas (zonernas) egenskap	2
Behandlingsform	3
Stödjande (tonifierande).....	3
Dämpande (dispenserande, skingrande)	3
Harmoniserande	3
Behandlingsinstrument	3
Nålar och moxa	3
Moderna instrument	3
Forskning.....	3
BioHarmonizer Konceptet	3
Instrument, hjälpmedel.....	4
BioAcu teknisk manual	5
BioAcu (BioHarmonizer)	5
Beskrivning	5
Inställning av BioAcu:	5
Punktsökning:.....	5
Automatiskt behandlingsval:.....	5
BioHarmonisering i Tiden	6
Test-procedur för BioAcu	7

BioCombi teknisk manual	8
Beskrivning	8
Funktionsbeskrivning	8
Test-procedur för BioCombi:	8
BioMulti teknisk manual	9
Beskrivning	9
Funktionsbeskrivning	9
Test-procedur för BioMulti:	9
BioRadiance teknisk manual	10
Beskrivning	10
BioRadianceMaster:	10
Batteri och batterilladdare:	10
Anslutning av BioRadianceMaster:	10
Anslutning av BioRadiancePlus:.....	10
Funktionbeskrivning.....	10
Att välja program:	11
Att starta valda program:	11
Automatiskt stopp av behandlingstiden:	11
Manuell avbrytning av pågående program:.....	11
Automatisk urkoppling:.....	11
Test protokoll för BioRadiance	12
Jämförandestudier:BioAcu, BioCombi, BioMulti och BioRadiance	13
BioAcu:	13
BioCombi:	13
BioMulti:	13
BioRadiance:	13
Gemensamt för alla instrument:	13

Klinisk manual

Enligt akupunktur traditionen

Akupunktur är en mångtusenårig medicinsk metod. Den vilar på en arbetshypotes om "energi-cirkulation" och dess reglering i människokroppen. Enligt traditionell akupunktur cirkulerar vital energi inne i människans kropp efter ett väl definierat program. Huvuddelen av denna cirkulation sker i speciella banor, som utgör meridiansystemet. Utefter dessa banor finns det platser, akupunkter, där vital energi koncentreras. Om cirkulationen av vital energi står i samklang med naturens förändringar, är den i rytmisk harmoni och människan befinner sig i ett gott hälsotillstånd. Men om den avviker från detta samband, uppträder vissa symtom och sjukdomar. Återställandet av hälsan fås genom reglering av den vitala energins cirkulation, eller bättre uttryckt: genom synkronisering med naturen. Diagnostisering och behandling av den vitala energin kräver speciella egenskaper hos terapeuten.

Behandlingsprincip

Behandlingsprincip omfattar *behandlingsområdet, punkt (zonernas) egenskap och behandlingsform*. Här nedan redovisas endast basprinciper i samband med BioHarmonizers instrumenter. Du kan lära dig mer på våra kurser eller vid en bra traditionell akupunkturskola.

Behandlingsområde (nivå)

Behandling sker på tre skilda nivåer, på *etiologisk, reflexzons och symptomnivå*.

Etiologisk nivå

Vital energi cirkulerar enligt ett bestämt mönster i förhållande till patientens ålder, kön och i förhållande till geografisk plats och årstid. Energi-diagnostiken uppenbarar den aktuella situationen, och indikerar därefter lämpliga behandlingsformer (se vidare). Behandlingen innefattar ett urval av speciella punkter och behandlingsformerna av dessa punkter. Antal punkter bör vara under fem. För att få optimalt resultat måste punkterna behandlas i början av varje behandlingstillfälle.

Avbildningszon (reflexbehandling)

Innebär behandling av de speciella reflexområdena, öronloben, ryggen, bålen, fotsulorna mm. Behandlingen utförs direkt efter en etiologisk behandling och enligt behandlingsform (se vidare). Antal behandlingszoner varierar från fall till fall.

Symptombehandling

Symptombehandling innefattar lokal behandling av symptom. Antal punkter är inte begränsat. Behandlingen utförs enligt behandlingsform (se vidare). I normala fall utförs behandlingen efter reflexbehandlingen som i sin tur utförs efter etiologisk behandling. Endast i akut fall utförs symptombehandlingen direkt och med den för tillfället lämpliga behandlingsformen.

Punkternas (zonernas) egenskap

Punkternas eller zonernas egenskaper kan vara *stödjande, dämpande och harmoniserande*.

Enligt traditionell akupunktur finns vissa punkter som har speciella egenskaper. De viktigaste egenskaper är stödjande, dämpande och harmoniserande. Behandlingsformen kan också vara stödjande, dämpande och harmoniserande (se vidare). I tabellen "BioHarmonisering i Tiden" visas punkter med tonifierande och disperserande egenskaper i förhållande till års tiderna.

Behandlingsform

Behandlingsform (behandlingssätt) kan vara *stödjande, dämpande och harmoniserande*.

Stödjande (tonifierande)

Under stödjande behandlingsform menas behandling som syftar till stimulera öka aktiviteten. Effekten är större om lämplig punkt behandlas och om lämplig nivå väljs, etiologisk, reflexzons eller symptomatisk.

Dämpande (dispenserande, skingrande)

Under dämpande behandlingsform menas behandling som syftar till att dämpa aktiviteten. Effekten är större om lämplig punkt behandlas och om lämplig nivå väljs, etiologisk, reflexzons eller symptomatisk.

Harmoniserande

Punkter med tonifierande egenskap tonifieras och punkter med dispenserande egenskap dämpas. Harmoniserande behandlingsform är mildare, den kan kombineras med punkter och zoner av stödjande, dämpande och harmoniserande egenskaper. Generellt, kan harmoniserande behandlingsform tillämpas på punkter med harmoniserande, tonifierande eller dispenserande egenskaper.

Behandlingsinstrument

Behandlingsinstrument kan vara av traditionell typ eller modern

Nålar och moxa

Nålar, moxa och massage på punkter och zoner är behandlingssätt enligt traditionen samt då man saknar effektivare medel (instrument). Om behandling med de traditionella medel läs vidare i lämplig litteratur.

Moderna instrument

Aktuella moderna instrument är i huvudsak punkt- eller zonstimulerande instrument av diverse elektro- eller elektromagnetisk typ. Olika frekvenser, vågform och intensitet ger behandlingsform av stödjande, dämpande eller harmoniserande natur. Behandlingseffekten kommer snabbare och kvarstår längre. Det är behändigare att använda moderna instrument än nålar och moxa. Då finns inte heller någon risk för smittoöverföring.

Forskning

Sedan 1970 har Stephan Tomac bedrivit intensiv forskning inom traditionell akupunktur med modern elektronik och datorteknologi. Syftet var att i vetenskaplig belysning kartlägga akupunktursens teori och praktik. Forskningen resulterade i upptäckten av elektriska fenomen i nära samband med akupunkturmeridiansystemet. Den nya upptäckten möjliggör elektrisk diagnostik av samtliga organ i människans kropp som njurar, lever, galla, mage, urinblåsa etc. Forskningen har klart påvisat att det uppmätta mätvärdet kan grupperas i tre stora grupper. Den första karakteriseras av verklig hälsa, den andra gruppen av de som tror sig vara friska (ej närvaro av symptom) men det ses klart och tydligt av mätresultatet att de avviker från grupp ett. Det tillståndet tolkas som en sorts inkubationstid, innan sjukdomen bryter ut. Den tredje gruppen är patienter med klara symptom och sjukdomsbild. Här finns en enorm variation av uppmätta elektriska värden. Det har visat sig möjligt att på elektrisk eller elektromagnetisk väg korrigera den felande elektriska signaturen och därmed få bot eller lindring.

BioHarmonizer Konceptet

Gammal traditionell läkekonst i kombination med modern teknologi har resulterat i en ny metod som har fått namnet BioHarmonizer konceptet. Inom BioHarmonizer konceptet används diverse instrument som är direkta resultat av denna forskning. De nuvarande instrumenten är lämpliga för både diagnos och behandling av "energierna" (enligt akupunktur-läran) dvs de elektriska fenomen som har samband med hälsa och sjukdom. Instrumenten är unika i sitt slag, det finns inga motsvarande någon annanstans. Kunskap, diagnos, behandling och behandlingsteknik förmedlas genom kurser, föreläsningar och olika publikationer.

Instrument, hjälpmedel

Instrument inom BioHarmonizer Konceptet som beskrivs i denna manual är:
BioAcu, BioCombi, BioMulti och BioRadiance.

BioAcu teknisk manual

BioAcu (BioHarmonizer)



Beskrivning

Instrumentlådan innehåller avancerad elektronik med laddningsbara NC-batterier. På en och en halv meter flexibel sladd finns en testprob försedd med 16 ID-dioder, brytare S och H, samt en fjädrande spets. På instrumentlådan finns anslutningskontakt för batteriladdare och ON/OFF brytare. Vid transport skall brytaren alltid vara i OFF-läge. Vid normal stationär användning skall den vara på ON och texten på lådan ska vara vänd uppåt. Före användning skall den vändas 180 grader och läggas under patientens knäveck eller i kontakt med patientens ena hand. Vid avslutad användning skall den åter lämnas (vändas) i ursprungligt läge.

Inställning av BioAcu:

Sätt spetsen på nollpunkten (så vertikalt som möjligt) i örat eller på APC. 3. (YİN TÁNG) mellan ögonbrynen. Tryck in S-knappen tills de två röda dioderna blinkar. Släpp nu S-knappen och tag bort spetsen från punkten. Nu är BioAcu inställd på genomsnittsvärdet av den totala Bio-energin hos patienten.

Punktsökning:

Sätt spetsen så vertikalt som möjligt mot huden på det område där punkten förväntas ligga. Låt trycket vara så pass att spetsen just börjar fjädra. Flytta spetsen med jämnt tryck höger-vänster, uppåt-nedåt, inom området där du söker punkten. Högst lysande diod visar var punkten ligger.

Automatiskt behandlingsval:

Sätt spetsen på vald punkt så du får indikering på ID-skalan. Om någon av dioderna under de två röda dioderna lyser, innebär detta att energin på den uppmätta punkten är under medelvärdet och därmed ska tonifieras. Om så önskas tryck på styrknappen H och håll den intryckt efter behov. I detta fall väljer BioAcu själv tonifierande elstimulering. Men i motsatta fall då dioderna över de röda lyser väljer BioAcu automatiskt en disperserande form av el ström. Det vill säga efter val av behandlingspunkter väljer BioAcu själv automatiskt den riktiga behandlingsformen (ton. /disp.). Så snart du släpper H styrknappen återgår BioAcu i diagnosläge. Denna operation tillåter dig att observera effekten av just utförd behandling. Du ser också hur mycket avståndet till det inställda medelvärdet minskat.

OBS:

Om fler än två dioder lyser samtidigt: Ladda BioAcu genast. Se också testprocedur för BioAcu. Ta för vana att kontrollera instrumentet en gång i månaden.

BioHarmonisering i Tiden

1. Ställ in BioAcu enligt instruktionen på punkten APC. 3. (YIN TÁNG).
2. Mät sedan mätvärdet på alla ändpunkter på fingrar och tår (se bilden).
3. För in dessa mätvärden i Aku-Energogrammet (se bilden) genom att sätta ett kryss på motsvarande meridians vertikala linje.
4. Sammanbind kryssen så du får en sammanhängande energikurva.
5. Energitillstånd som befinner sig mellan +2 och -2 betraktas som normala. De meridianer som befinner sig mellan -2 och -7 skall korrigeras. Detta görs genom att välja den/de meridian/er som har det allra lägsta värdet. Notera dessa.
6. I tabellen "BioHarmonisering i Tiden" (se bilden) väljs punkt/erna från årstiden just före den nuvarande. D v s om det är sommar nu så väljer du vårpunkter. De utvalda punkterna skall tonifieras.
7. Sök centrum av den valda punkten/erna enligt beskrivningen om punktsökning.
8. Tryck på H-knappen och håll den intryckt. Observera att behandlingsströmmen ökar successivt med tiden. Oftast känns inget alls vid starten, en svag förnimmelse kan kännas efter ett par sekunder och om behandlingen förlängs kan den bli obehagligt för patienten. Strömsensationen kommer mycket snabbt vid behandling i öronen. Om behandlingen upplevs smärtsam, avbryt genast genom att lyfta upp fingret från H-knappen. Informera patienten om att denne själv kan avbryta genom att lyfta handen/benet från instrumentlådan. Tortera inte patienten! Du får resultat innan patienten förnimmer smärta. Du kan verifiera detta om du emellanåt släpper H-knappen och observerar behandlingseffekten på ID-diodskalan.
9. Om du så önskar kan du göra en ny mätning efter 5 min och föra in den i diagrammet.

Mer avancerad energireglering lärs ut på speciella BioHarmonizer kurser.

Test-procedur för BioAcu

1. Ladda BioAcu under 24 timmar
2. Frånkoppla laddningsladdan
3. Tryck på strömbrytaren
4. Vänd på instrumentlådan: (obs. : minst en, max två dioder av 16 lyser)
5. Håll därefter S knappen intryckt tills två röda dioder börjar blinka, släpp knappen
6. Lägg spetsen på lådan: (obs. : nu lyser högsta dioden +7)
7. Lyft spetsen från lådan: (obs. : nu lyser åter de röda)
8. Lägg spetsen på lådan, tryck och håll samtidigt S knappen, tills de två mittersta röda börjar blinka, släpp nu S knappen
9. Lyft spetsen från lådan: (obs. : nu lyser lägsta dioden -7)
10. Tryck nu H knappen: (obs. : nu lyser de röda)
11. Håll S knappen intryckt tills två röda dioder börjar blinka
12. Låt nu instrumentet vila på bordet, notera tiden (kl och min): (obs. : efter 5 minuter ska samma röda dioder lysa)

Om ovannämnda test kunnat genomföras utan problem befinner sig BioAcu i utmärkt skick.

BioCombi teknisk manual

Beskrivning

Instrumentlådan innehåller avancerad elektronik med laddningsbara NC-batterier. På ena sidan av instrumentlådan finns anslutningskontakt för batteriladdare, ON/OFF brytare, och två frekvensinställningsknappar. På motsatta sidan finns kontakt för anslutning av olika dioder.

Dioderna till BioCombi kan enkelt skiftas efter önskemål. Det enda man skall tänka på är att röd punkt på ljusdioden skall passa mot röd punkt på apparaten och tryckas in. Dioden borttages genom att man tar tag i den räfflade kragen och drar ut. På den smala längsgående sidan finns brytare som aktiverar/desaktiverar inställt program.

BioCombi får laddas endast med medföljande NC-batteriladdare. Om instrumentens display börjar blinka (släckas) vid användning är det tecken på att batterierna nästan är urladdade. Ladda i så fall instrumentet under maximum 24 timmar. Använd sedan instrumentet och observera hur lång tid som går tills displayen börjar blinka. Anpassa laddningstiden därefter. Överladda inte instrumenten.

Funktionsbeskrivning

Strömställaren skall vara i funktionsläge ON, varvid displayen lyser och visar två siffergrupper 0 och 00. Första nollan markerar 16 olika program från 0 till 15, se tabellen. Varje program består av ett speciellt antal pulser/sekund. De två andra siffrorna indikerar en ökning/minskning av huvudprogrammets frekvens med 10, 20, 30%.

Exempel: Låt oss anta att första nollan (0) är inställd på program 5 som representerar 10 pulser/sekund. Då kan man öka densamma med 10 % till 11 pulser/sekund. Ökar man med 20 % blir pulsen 12 och så vidare, sak samma om man minskar med 10 % då det blir 9 pulser/sekund och så vidare.

Följande program kan ses som riktlinjer vid behandling:

Program 5 00 = Stärkande, stödjande, tonifierande
Program 7 00 = Bromsande, disperserande
Program L 00 = Harmoniserande, reglerande

Program - 00 = Spänningslösande, mot inflammationer, sårläkning

Funktionskontroll för instrumenten

Det kan vara lämpligt att ett par gånger per år testa funktion hos instrumenten. För att underlätta detta följ anvisningar enligt nedan.

Test-procedur för BioCombi:

1. Ladda instrumentet under 24 timmar
2. Frånkoppla laddningssladden
3. Tryck på strömbrytaren
4. Provställ samtliga inställningar
5. Ställ in den på 5 -20 (notera tiden (kl och min)
6. Efter 1 timme ska siffrorna 5 -20 vara stabila (ej blinka)

Om ovannämnda test kunnat genomföras utan problem befinner sig BioCombi i utmärkt skick.

BioMulti teknisk manual

Beskrivning

Instrumentlådan innehåller avancerad elektronik med laddningsbara NC-batterier. På ena sidan av instrumentlådan finns anslutningskontakt för batteriladdare, ON/OFF brytare, och två frekvensinställningsknappar. På motsatta sidan finns strålningsytan genom vilken det inställda programmet strålar. På smala längsgående sidan finns brytare som aktiverar/desaktiverar inställt program. På den stora flata sidan är displayen som visar inställt program. BioMulti får laddas endast med medföljande NC-batteriladdare. Om instrumentens display börjar blinka (släckas) vid användning är det tecken på att batterierna nästan är urladdade. Ladda i så fall instrumentet under maximum 24 timmar. Använd sedan instrumentet och observera hur lång tid som går tills displayen börjar blinka. Anpassa laddningstiden därefter. Överladda inte instrumenten.

Funktionsbeskrivning

Strömställaren skall vara i funktionsläge ON, varvid displayen lyser och visar två siffergrupper 0 och 00. Första nollan markerar 16 olika program från 0 till 15, se tabellen. Varje program består av ett speciellt antal pulser/sekund. De två andra siffrorna indikerar en ökning/minskning av huvudprogrammets frekvens med 10, 20, 30%.

Exempel: Låt oss anta att första nollan (0) är inställd på program 5 som representerar 10 pulser/sekund. Då kan man öka densamma med 10 % till 11 pulser/sekund. Ökar man med 20 % blir pulsen 12 och så vidare, sak samma om man minskar med 10 % då det blir 9 pulser/sekund och så vidare.

Laddning med NC-batteriladdare bör ske minst en gång per vecka. Om apparaten använts särskilt mycket under dagen är det lämpligt att ladda den varje natt. Laddningen sker under maximum 24 timmar och minimum 12 timmar.

Följande program kan ses som riktlinjer vid behandling:

Program 5 00 = Stärkande, stödjande, tonifierande
Program 7 00 = Bromsande, disperserande
Program L 00 = Harmoniserande, reglerande

Program - 00 = Spänningslösande, mot inflammationer, sårläkning

Funktionskontroll för instrumenten

Det kan vara lämpligt att ett par gånger per år testa funktion hos instrumenten. För att underlätta detta följ anvisningar enligt nedan.

Test-procedur för BioMulti:

1. Ladda instrumentet under 24 timmar
2. Frånkoppla laddningsladdan
3. Tryck på strömbrytaren
4. Provställ samtliga inställningar
5. Ställ in den på 5 -20 (notera tiden (kl och min)
6. Efter 1 timme ska siffrorna 5 -20 vara stabila (ej blinka)

Om ovannämnda test kunnat genomföras utan problem befinner sig BioMulti i utmärkt skick.

BioRadiance teknisk manual

Beskrivning

BioRadiance (#BR500 - mod. 1990):

1st BioRadianceMaster (Styr- och behandlingsenhet)

1st batteripack, 2 Ah (två uttag) med underhållsladdare (115/230V)

1st likriktare 115/230V till 12V likström

1st Klinisk och Teknisk manual (denna manual)

1st Lathund

Tillbehör:

1st BioRadiancePlus (extra behandlingsdel som kopplas samman med BioRadianceMaster)

1st T-kabel

1st batteripack 4,4 Ah (två uttag) med underhållsladdare (115/230V)

Vid beställning väljer kunden batteripack eller likriktare.

BioRadianceMaster:

BioRadianceMaster omfattas av en svart instrumentlåda byggd av en speciell plast som släpper igenom IRstrålning. Lådan har följande dimensioner: 10*19,5*3,5 cm vilket ungefär motsvarar VHS videokassetbands storlek. Den väger 400gr och är lätt att hålla i en normalt stor hand. Lådan innehåller elektronik (med två mikroprocessorer), en display, samt IR dioder som strålar genom botten på lådan. På toppen av lådan finns ett tangentbord som styr elektroniken. I nedersta delen av instrumentet finns två T kontakter (för anslutning av BioRadiancePlus) och en mycket böjlig sladd med kontakt för anslutning till batteri. På översta delen av instrumentet finns en indikationsdiod som blinkar om IR strålningen är påslagen.

Om BioRadiance används vid stationärt bruk ansluts underhållsladdaren till batteriet och BioRadianceMaster batterikontakt till batteriet. Om den däremot används vid icke stationärt bruk kopplas batteri laddaren från batterier. BioRadianceMaster kan transporteras tillsammans med batteriet men låt inte batteriet vara utan laddning längre än 7 dagar. Vid stationärt bruk kan också BioRadianceMaster direkt anslutas till likriktarens uttag 12V

Batteri och batteriladdare:

Sträva alltid efter att ha batteriet under kontinuerlig laddning, det kan ej överladdas. Batteripaketet är sammansatt av 10 NC celler och ger 12V, 2 Ah. Ett tomt batteri får laddas endast med den medföljande laddaren. Batteriet är försett med två uttag som medger samtidig anslutning av BioRadianceMaster och batteriladdare. I de fall BioRadiance används utan att batteriladdning samtidigt pågår, räcker ett fulladdat batteri för ca 100 effektiva behandlingsminuter.

Anslutning av BioRadianceMaster:

Anslut BioRadianceMaster styr- och behandlingsenhet till valfri kontakt på batteriet eller direkt till likriktaren.

Anslutning av BioRadiancePlus:

Anslut T-kabeln med ena ändan i BioRadiancePlus och andra ändan i valfri kontakt på BioRadianceMaster.

Funktionbeskrivning

Du sätter på BioRadiance genom att trycka på tangenten ON/OFF. Observera att tangenterna är av speciell typ som kräver ett snabbt och kvickt tryck på tangenten. I annat fall kan den uppfattas som en dubbel tryckning. Det första som dyker upp på LCD displayen, är BioHarmonizer Copyright meddelandet, året och versionsnumret. Efter att dessa meddelande har visats, är BioRadiance klar att användas.

COPYRIGHT 2014-1

BIO-HARMONIZER

PROG. 20 HALTED

Att välja program:

BioRadiance innehåller en mängd program för olika syften. Se Kliniska delen av denna manual. BioRadiance innehåller 24 olika basprogram. Under varje programnummer finns redan automatiskt inställda frekvenser. 1 till 15 är program med frekvens från ca 1 till 10000 Hz. Program 20 har harmoniserande effekt, 30 tonifierande och 40 disperaserande effekt. Vilket program du skall välja kan du lära dig på BioHarmonizer-kurser. Du kan också själv hitta lämpliga program för dina patienter om du har kunskaper inom akupunktur.

LCD display visar det aktuella programmet som är klart att starta. Du bläddrar genom programmen genom att använda piltangenterna, uppåt eller neråt. Du kan också hålla piltangenten intryckt så kommer du snabbare genom programbanken.

Att starta valda program:

Du startar det program du valt genom att använda START/STOP tangenten. Då du startat ett program hörs en pip-ton, samtidigt förändras också texten på LCD displayen från HALTED till RUNNING och indikationsdioden på översta delen av BioRadiance blinkar.

PROG. 20 HALTED

PROG. 20 RUNNING

Automatiskt stopp av behandlingstiden:

Efter ca 60 sekunder avbryter BioRadiance-behandlingen och piptonen ljuder tre gånger. Texten på LCD displayen ändras tillbaka till HALTED och indikationsdioden slutar blinka. Du kan nu påbörja en ny behandlingscykel med samma program eller välja ett annat om så önskas.

PROG. 20 RUNNING

PROG. 20 HALTED

Manuell avbrytning av pågående program:

Om du önskar kortare behandlingsperiod än den inprogrammerade (60 sekunder) tryck på START/STOP tangenten. Att programmet har blivit avbrutet bekräftas på LCD displayen, genom en pip-ton och genom att indikationsdioden slutar blinka.

PROG. 20 RUNNING

PROG. 20 HALTED

BioRadianceMaster III med nytt program 2014-1:

Ny programvara med uppdatering av program från 1990-1 och senare. Tidigare instruktioner är giltiga och du kan fortsätta använda BioRadiance precis som tidigare. Program 20 har utökats med 21, 22, 23, 24 och 25.

För att få optimal harmoniserande och vitaliserande effekt använd program 20 till 25 i ett svep. Det tar sammanlagt 6 minuter och inverkar generellt harmoniserande och vitaliserande oberoende av vad klienten lider av.

För att få den nämnda effekten får du inte avbryta behandlingen, du måste göra den i ett svep i 6*1 minut.

(Du kan välja tre min pass med något svagare effekt. Då används 20, 22 och 24 eller 21, 23 och 25).

Om du vill testa enskilt lämpligt program för ett specifikt tillstånd har du alla andra program att tillgå.

Lämpligaste program för testning är program 1 till 15.

OBS

BioRadianceMaster från 1990 och senare kan uppdateras om du så önskar till 2014-1 program version utan extra kostnad..

Test protokoll för BioRadiance

1. Anslut BioRadiance till ett laddat batteri eller likriktaren. Observera LCD display presentationen som avslutar med:
PROG. 20 HALTED
2. Tryck ett par gånger på tangenten ON/OFF och observera på LCD displayen av- och påslagningen av BioRadiance.
3. Tryck igen på tangenten ON/OFF tills meddelande PROG.20 HALTED visas på LCD displayen. Vänta och observera om automatisk avstängning sker efter ca 60 sekunder.
4. Tryck igen på tangenten ON/OFF tills meddelande PROG.20 HALTED visas på LCD displayen. Tryck nu enstaka gånger på piltangenterna uppåt och sedan nedåt.
5. Välj valfritt program och tryck på tangenten START/STOP. Observera att texten HALTED ersätts med RUNNING.
6. Tryck åter igen på START/STOP tangenten och texten RUNNING ersätts med HALTED.
7. Tryck ett par gången på START/STOP tangenten. Vid varje tryck på tangenten START/STOP hörs en ljudsignal.
8. Starta nu igen med tryck på tangenten START så texten RUNNING visas. Observera nu att RUNNING perioden avslutas efter ca 60 sekunder och 3 ljudsignaler.
9. Välj nu ett annat program med en av piltangenterna och upprepa enligt testprotokollets punkt 8.
10. Om allt fortlöper enligt testprotokollet fungerar din BioRadiance enligt specifikation.
11. Om texten LOW BATTERY visas under pågående test, måste du ladda batteriet omgående enligt instruktionerna och sedan upprepa hela testen igen.
12. Om inte någon text i LCD displayen visas och batteriet är garanterat laddat kontaktar du närmaste BioHarmonizer representant som hjälper dig att återställa din BioRadiance i funktionsdugligt skick.

Automatisk urkoppling:

Om BioRadiance är i läge HALTED och inte används igen inom en tid av 60 sekunder urkopplas den automatiskt för att spara batterierna.

Jämförandestudier:

BioAcu, BioCombi, BioMulti och BioRadianc

BioAcu:

BioAcu är det enda instrumentet i världen idag som finner akupunkterna eller energipunkterna utan att samtidigt förändra deras egenskaper och därigenom eventuellt blockera behandlingen. Stimulering av dessa energicentra måste ske mitt i centrum, alltså där punkten är känsligast och där behandlingen blir mest effektiv. Dessa energicentra hittas enkelt och snabbt. Efter utförd behandling kan du direkt se och verifiera resultatet av behandlingen tack vare BioAcu. BioAcu är ett utmärkt instrument att göra diagnos över den totala fördelningen av energin i en människas kropp. Vid terapi kan den användas för att stimulera akupunkterna, reflexpunkterna vid örönterapi samt lokala punkter. BioAcus främsta fördel är att den klart och tydligt kan diagnosticera energitillståndet och verifiera effekten av behandlingen efteråt.

BioCombi:

BioCombi behandlar med hjälp av pulserande ljus. Hela ljusspektrat från blått till rött och även till infrarött ljus, som är osynligt, innefattas av sju olika dioder: blått, grönt, gult, orange, rött, infrarött och infraröd LASER. Varje diod eller ljuskälla har sin egen våglängd mellan 400-950 nanometer. Dessutom pulsas dessa våglängder. Det finns 112 olika pulsformer som kan kombineras och därmed anpassas precis efter patientens behov. Behandlingen innebär att en vald våglängd, dvs färg, pulsas på en viss punkt eller på ett visst område. Fördelen med BioCombi är den bekväma behandlingen av punkter och reflexzoner i t. ex örönen, generella akupunkturpunkter samt fotzonsterapi. Detta gör den speciellt lämplig att behandla barn och känsliga personer med.

BioMulti:

BioMulti är lämplig vid behandlingar av större ytor. BioMulti behandlar endast med infrarött ljus 950 nm. Detta ljus pulsas på samma sätt som med BioCombi. Den främsta fördelen med BioMulti är att den behandlar stora ytor, t. ex ansiktet, örönen, händerna och fotsulorna.

BioRadianc:

För behandling av riktigt stora ytor, som t. ex rygg, axlar, stora muskelytor, är BioRadianc det bästa instrumentet. BioRadianc är lämplig för behandling av stora hudytor vid brännskador, eksem samt bidrar till ett snabbare återställande efter operationer. Den är också mycket bra vid all idrottsträning samt vid bot och lindring av uppkomna skador. Förinställda behandlingsprogram gör detta instrument lätthanterligt. I jämförelse med BioMulti behandlar BioRadianc samma yta tio gånger snabbare. Den är också lämplig för behandling av stora djur, som t. ex stora hundar, kalvar, kor och hästar.

Gemensamt för alla instrument:



Varje instrument är framställt med största möjliga omsorg med syfte att garantera en praktik utan avbrott och störningar. Laddningsbara batterier gör att instrumenten har låg vikt och kan användas överallt även där det inte finns tillgång till elektricitet. Dessutom tål instrumenten en rätt omild behandling.

OBS - VIKTIGT:


Laddaren för BioAcu, BioCombi och BioMulti är densamma för alla tre instrumenten.
Laddaren för BioRadianc är underhållsladdare och kan ladda batteriet kontinuerligt utan att överladda det.
För stationärt bruk kan en likriktare levereras istället för batteri och batteriladdare. (gäller endast BioRadianc).

ANSVAR:


Använd nämnda varor (instrument, batterier, laddare...) endast enligt instruktioner i denna manual. Vid annan användning ansvarar ej.

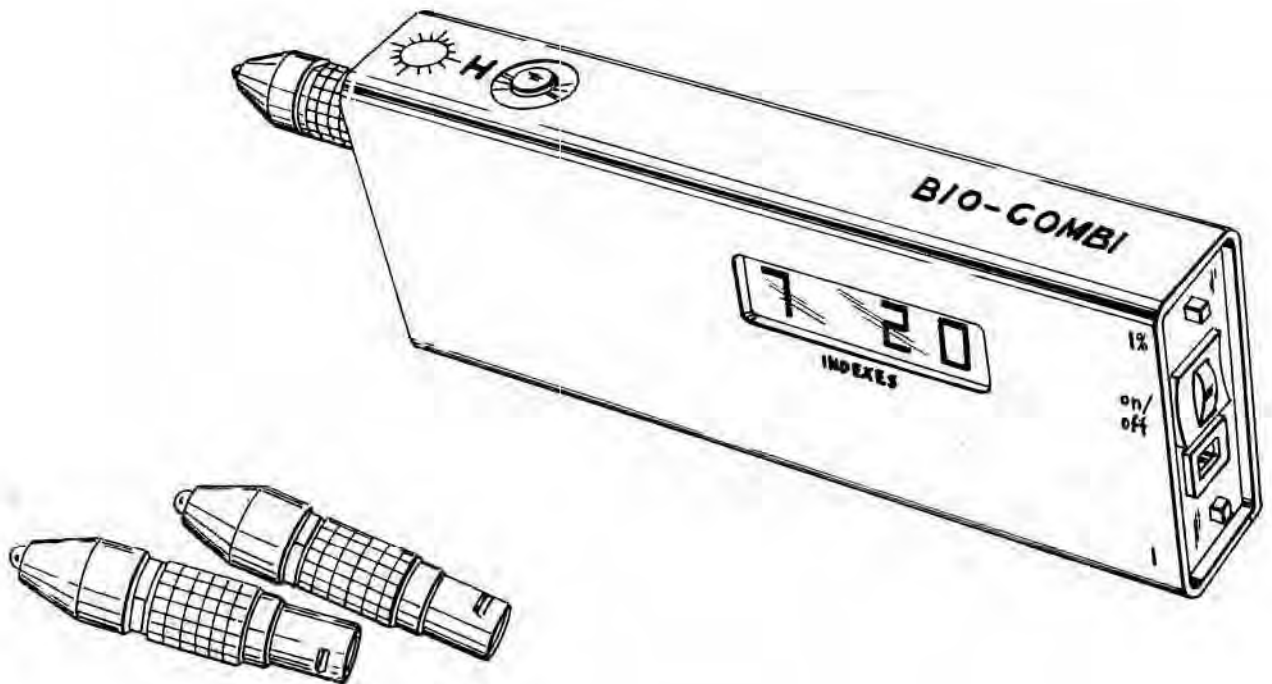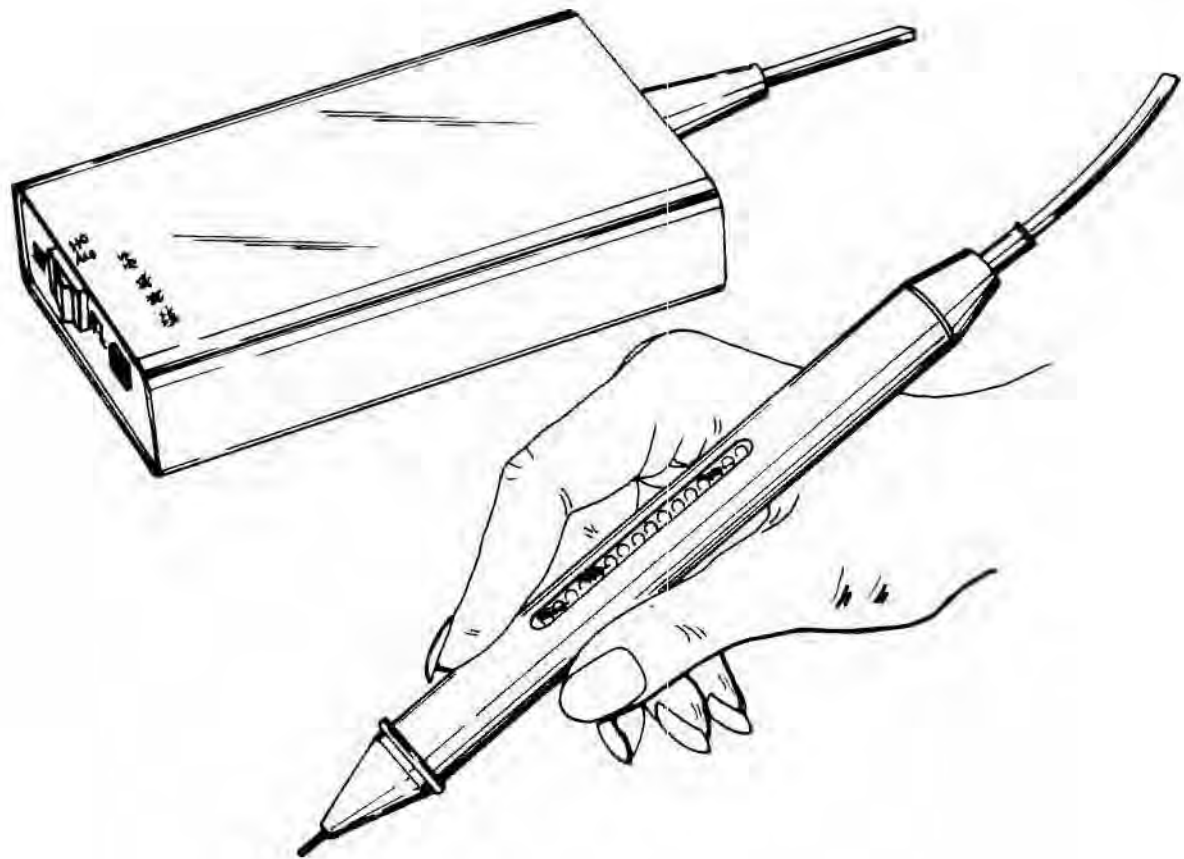

BioAcu och BioCombi för diagnos och punktbehandling

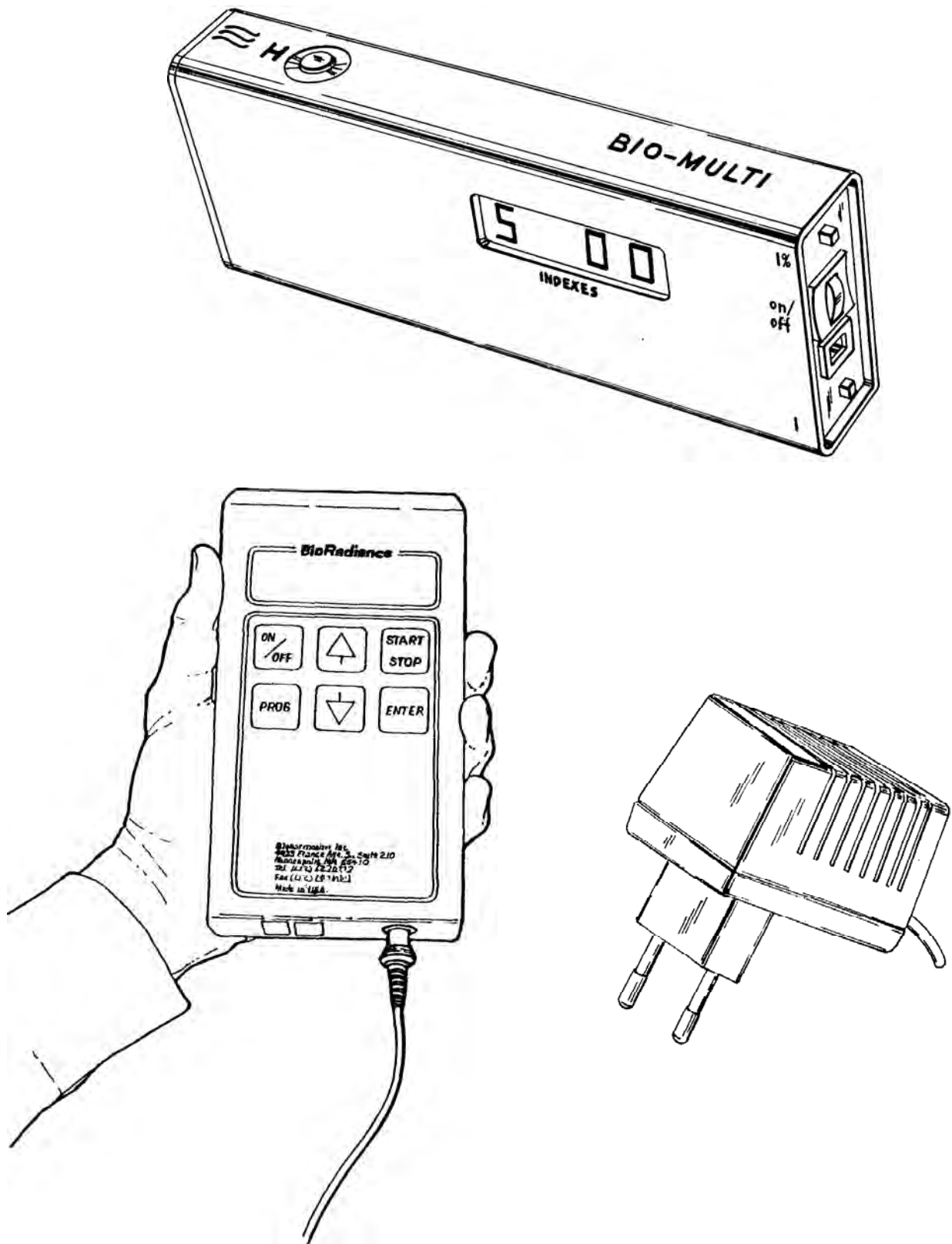

BioMulti och BioRadianc för behandling av stora ytor

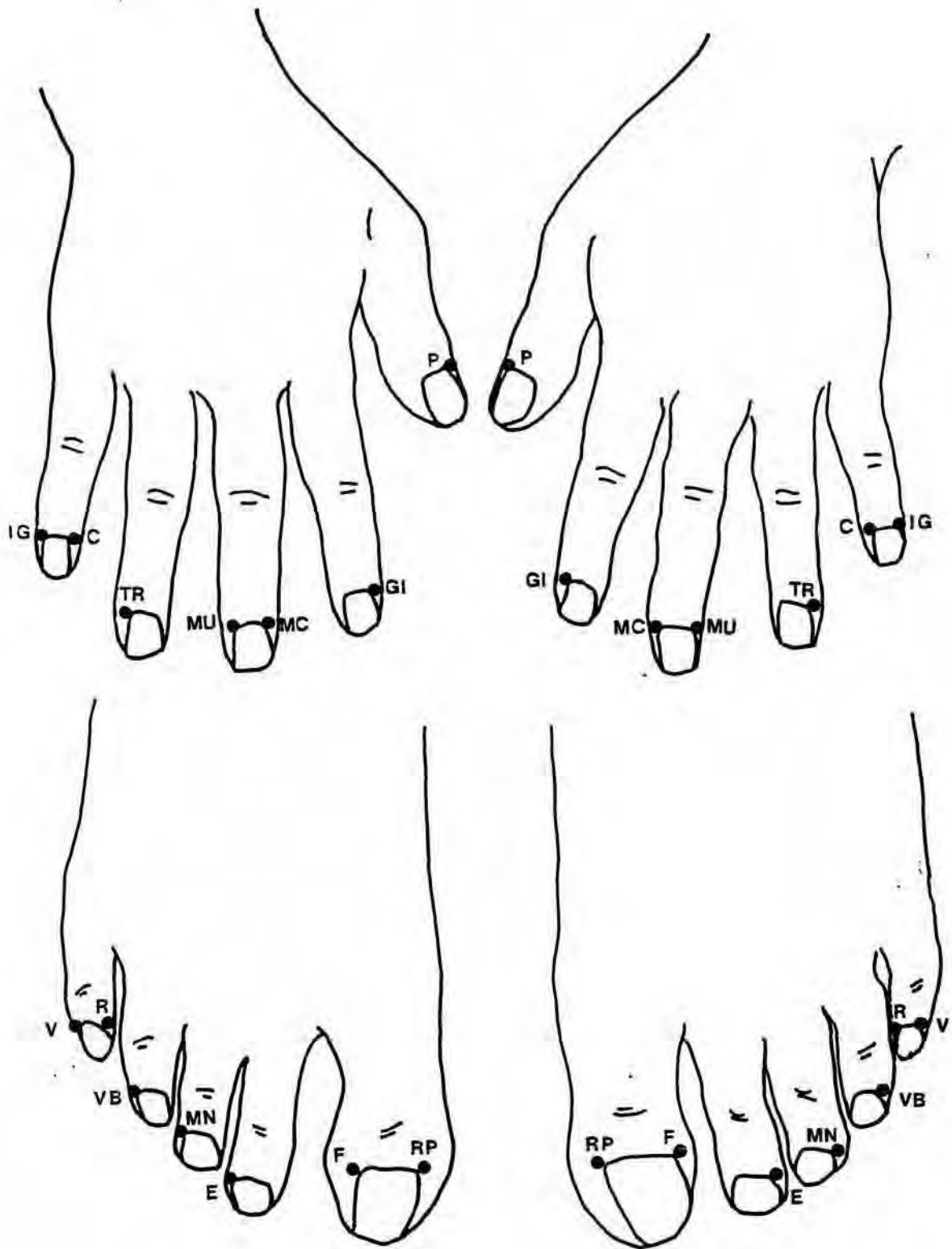



JǏNG – mätpunkter enligt de fem elementen och BioHarmonisering i Tiden

瑞典鍼灸科

Svenska Akupunktur Institutet
BioHarmonizer® Konceptet
Stephan Tomac
 Sveavägen 49, 5tr.
 113 59 STOCKHOLM
 Tel.: +46-8-31 44 56
<http://www.correctus.se>
 e-mail: info@correctus.se

Namn: _____
 1. Datum: _____
 2. Datum: _____
 3. Datum: _____
 4. Datum: _____

BioAcu Energogram Våren

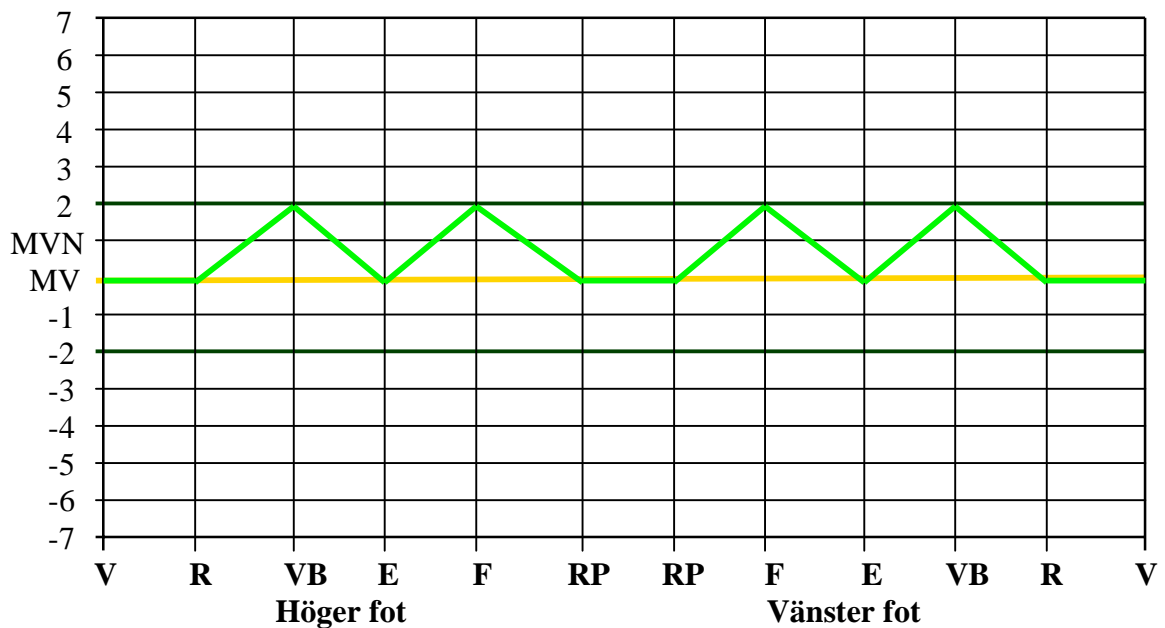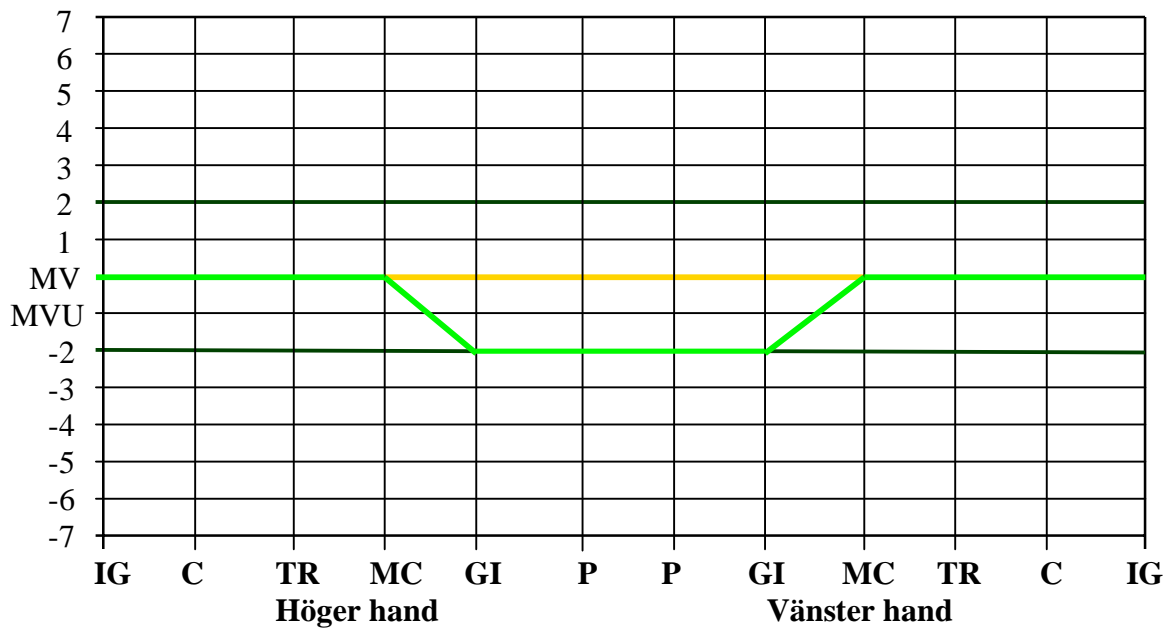



Vårens optimala energivärden för VB, F, GI, P; RP och E har medelvärde;
 IG, C, TR och MC tendera uppåt och R och V energivärden tenderar neråt.

瑞典
鍼灸
科

Svenska Akupunktur Institutet
BioHarmonizer® Konceptet
Stephan Tomac
 Sveavägen 49, 5tr.
 113 59 STOCKHOLM
 Tel.: +46-8-31 44 56
<http://www.correctus.se>
 e-mail: info@correctus.se

Namn: _____
 1. Datum: _____
 2. Datum: _____
 3. Datum: _____
 4. Datum: _____

BioAcu Energogram Sommaren

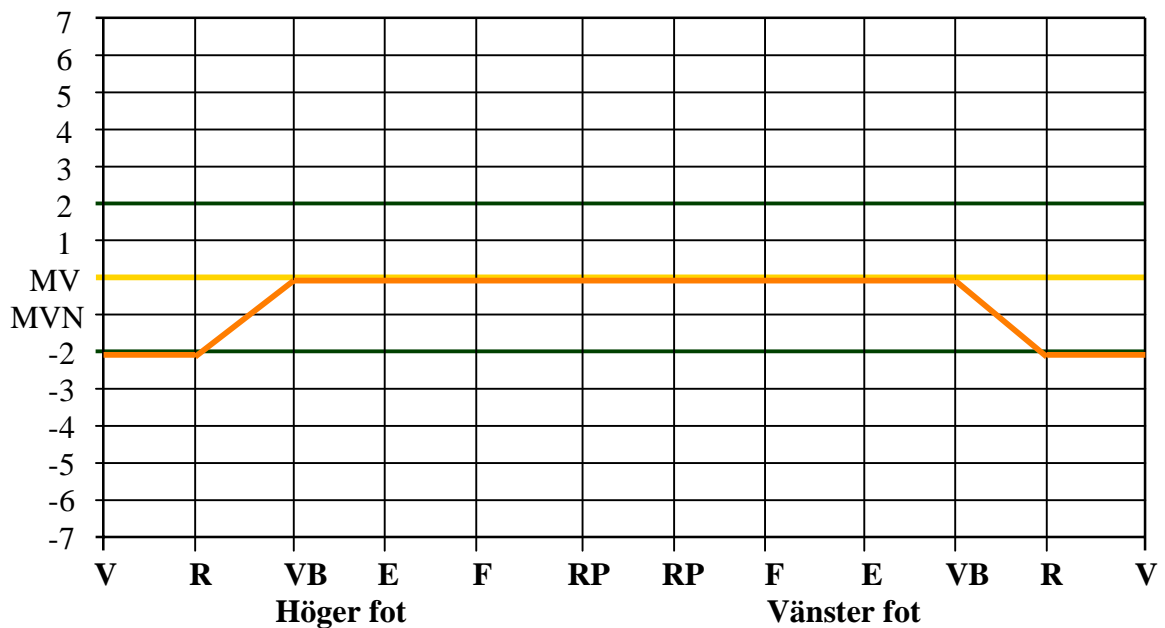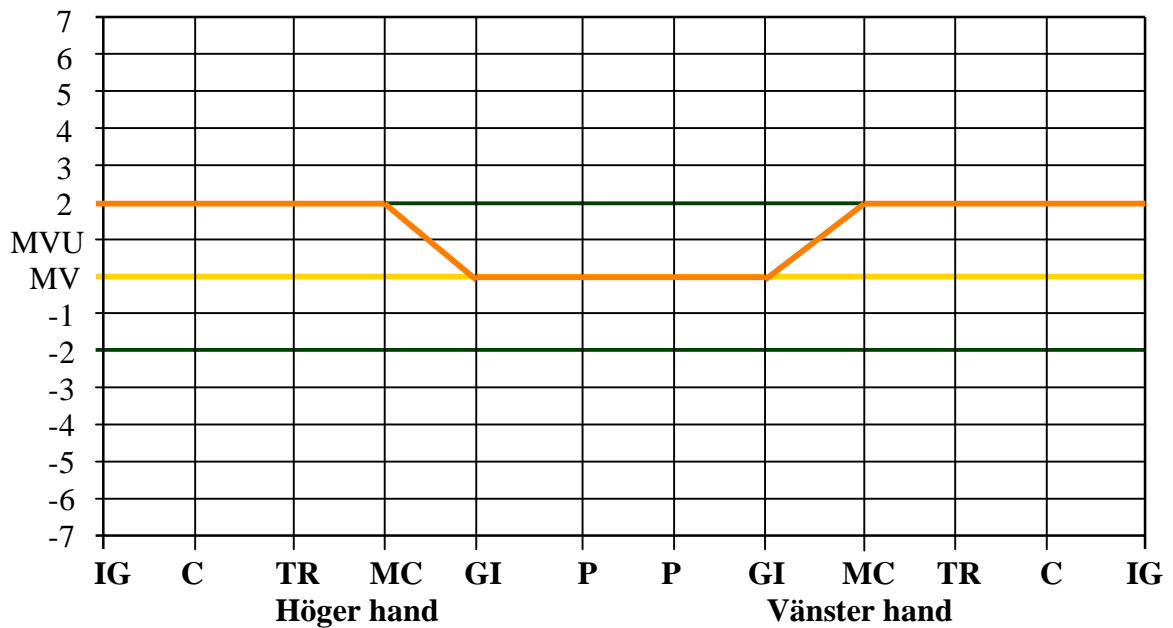



Sommarens optimala energivärden för IG, C, TR, MC, R och V;
 RP och E har medelvärde; P och GI tenderar uppåt och VB och F tenderar neråt

瑞典
鍼灸
科

Svenska Akupunktur Institutet
BioHarmonizer® Konceptet
Stephan Tomac
 Sveavägen 49, 5tr.
 113 59 STOCKHOLM
 Tel.: +46-8-31 44 56
 http://www.correctus.se
 e-mail: info@correctus.se

Namn: _____
 1. Datum: _____
 2. Datum: _____
 3. Datum: _____
 4. Datum: _____

BioAcu Energogram Hösten

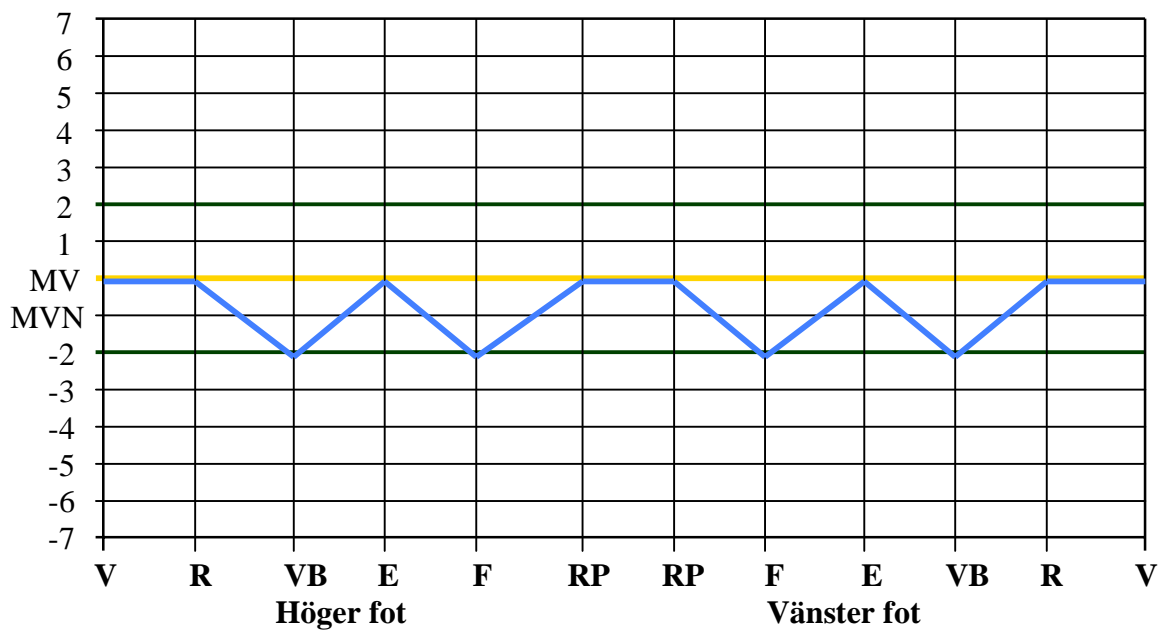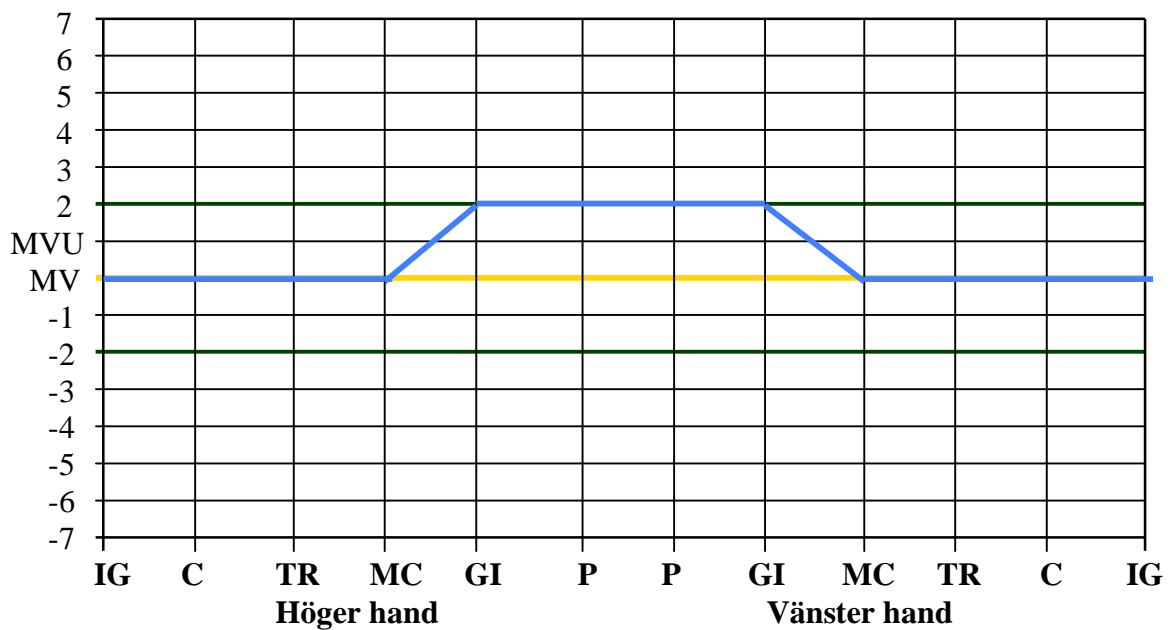



Höstens optimala energivärden för P, GI och VB, F; RP och E har medelvärde;
 R och V tenderar uppåt, och IG, C, TR, MC tenderar neråt

瑞典
鍼灸
科


Svenska Akupunktur Institutet
BioHarmonizer® Konceptet
Stephan Tomac
 Sveavägen 49, 5tr.
 113 59 STOCKHOLM
 Tel.: +46-8-31 44 56
<http://www.correctus.se>
 e-mail: info@correctus.se

Namn: _____
 1. Datum: _____
 2. Datum: _____
 3. Datum: _____
 4. Datum: _____

BioAcu Energogram Vinter

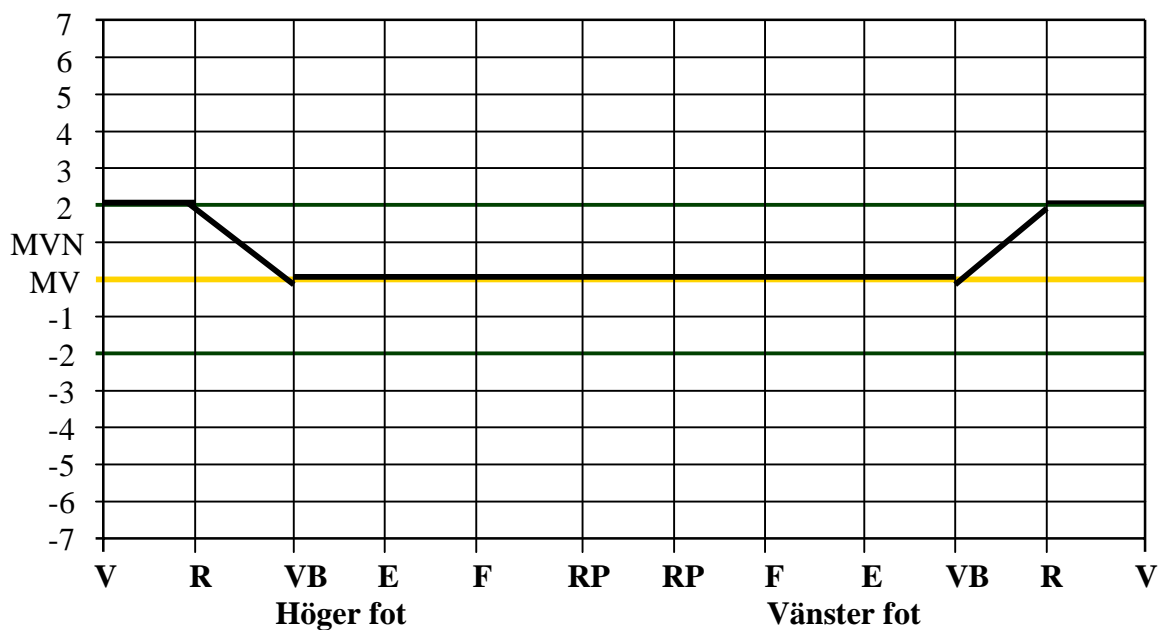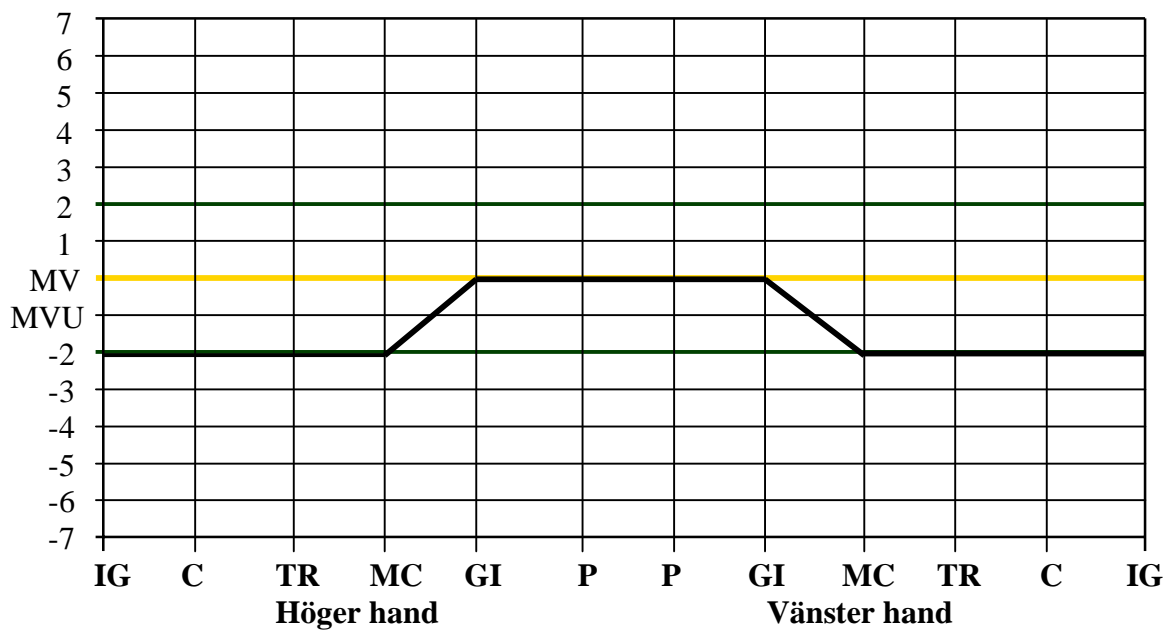

Vinters optimala energivärden för R, V, IG, C, TR och MC; RP och E har medelvärde;
 VB och F tenderar uppåt och P och GI tenderar neråt

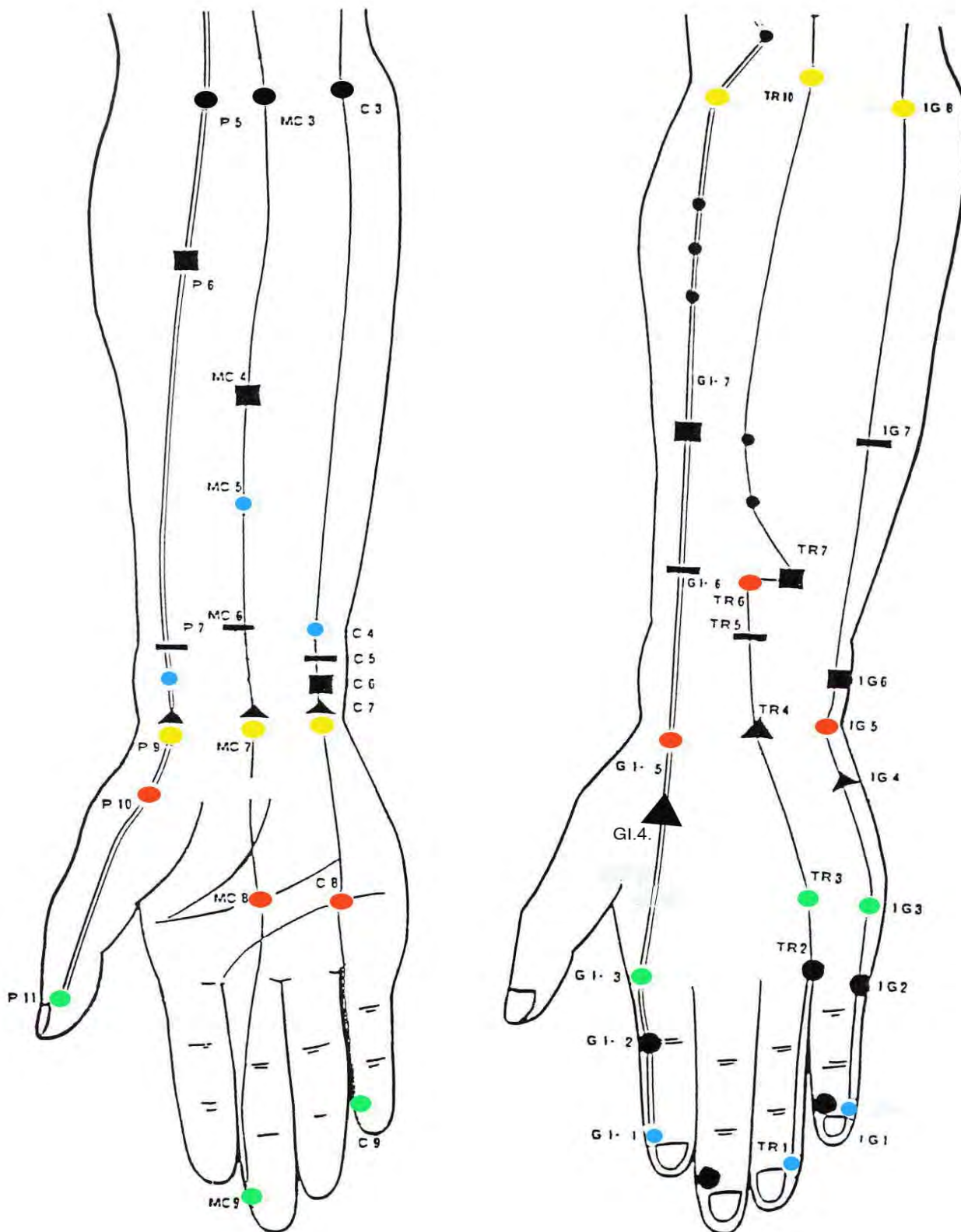


JING YING SHU YUAN JING HE och LUO punkter

Meridian YÁNG

VB	Galla	xx
IG	Tunntarm	xx
TR	Trippel-värmare	xx
E	Magen	xx
GI	Tjocktarm	xx
V	Urinblåsa	xx

Meridian YĪN

F	Lever	xx
C	Hjärta	xx
MC	Maitre Coeur	xx
RP	Mjälten	xx
P	Lunga	xx
R	Njurar	xx

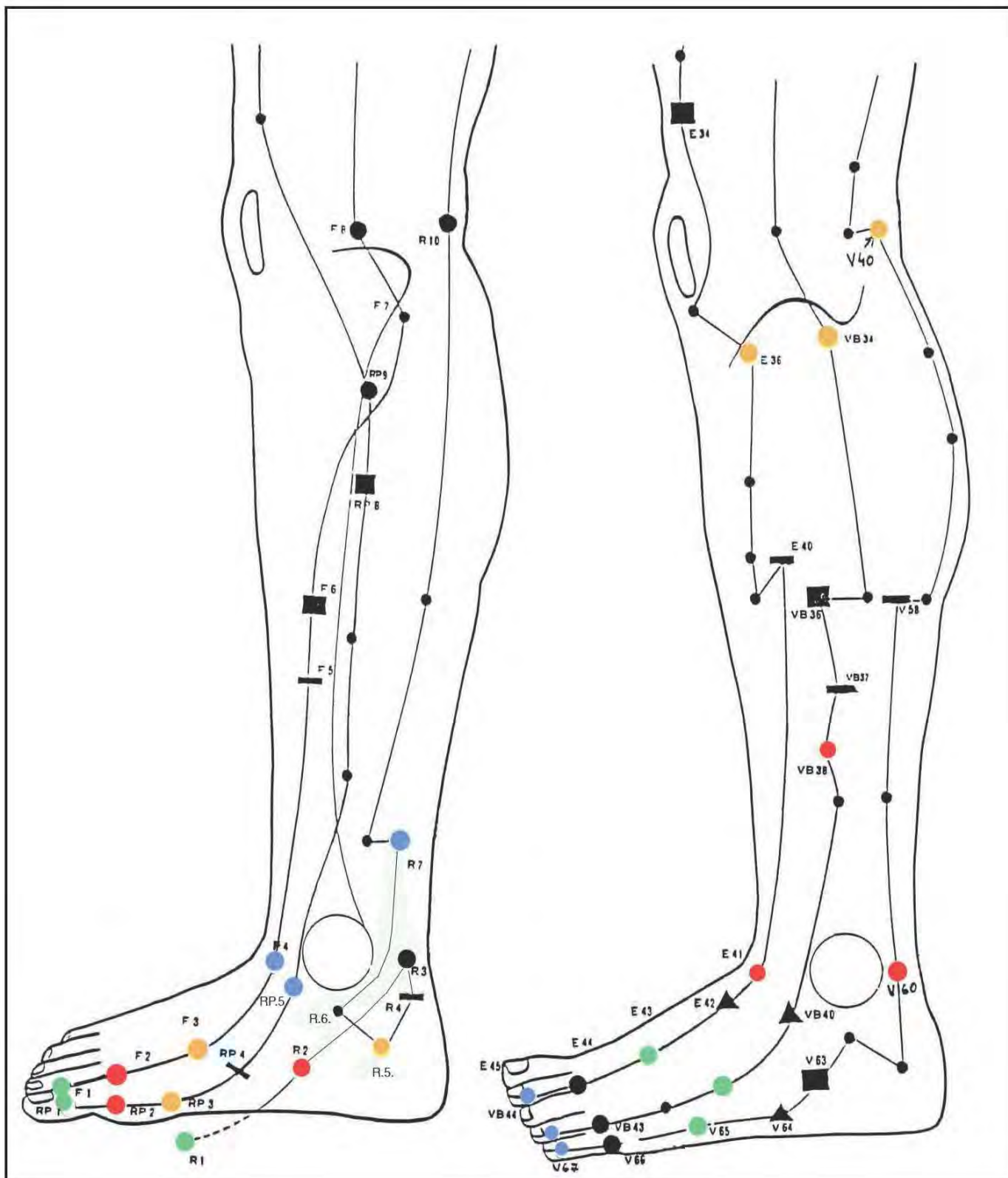


JǐNG YǐNG SHŪ YuÁN JǐNG Hé och LUÒ punkter

Meridian YÁNG


VB	Galla	xx
IG	Tunntarm	xx
TR	Trippel-värmare	xx
E	Magen	xx
GI	Tjocktarm	xx
V	Urinblåsa	xx

Meridian YĪN

F	Lever	xx
C	Hjärta	xx
MC	Måitre Coeur	xx
RP	Mjälten	xx
P	Lunga	xx
R	Njurar	xx

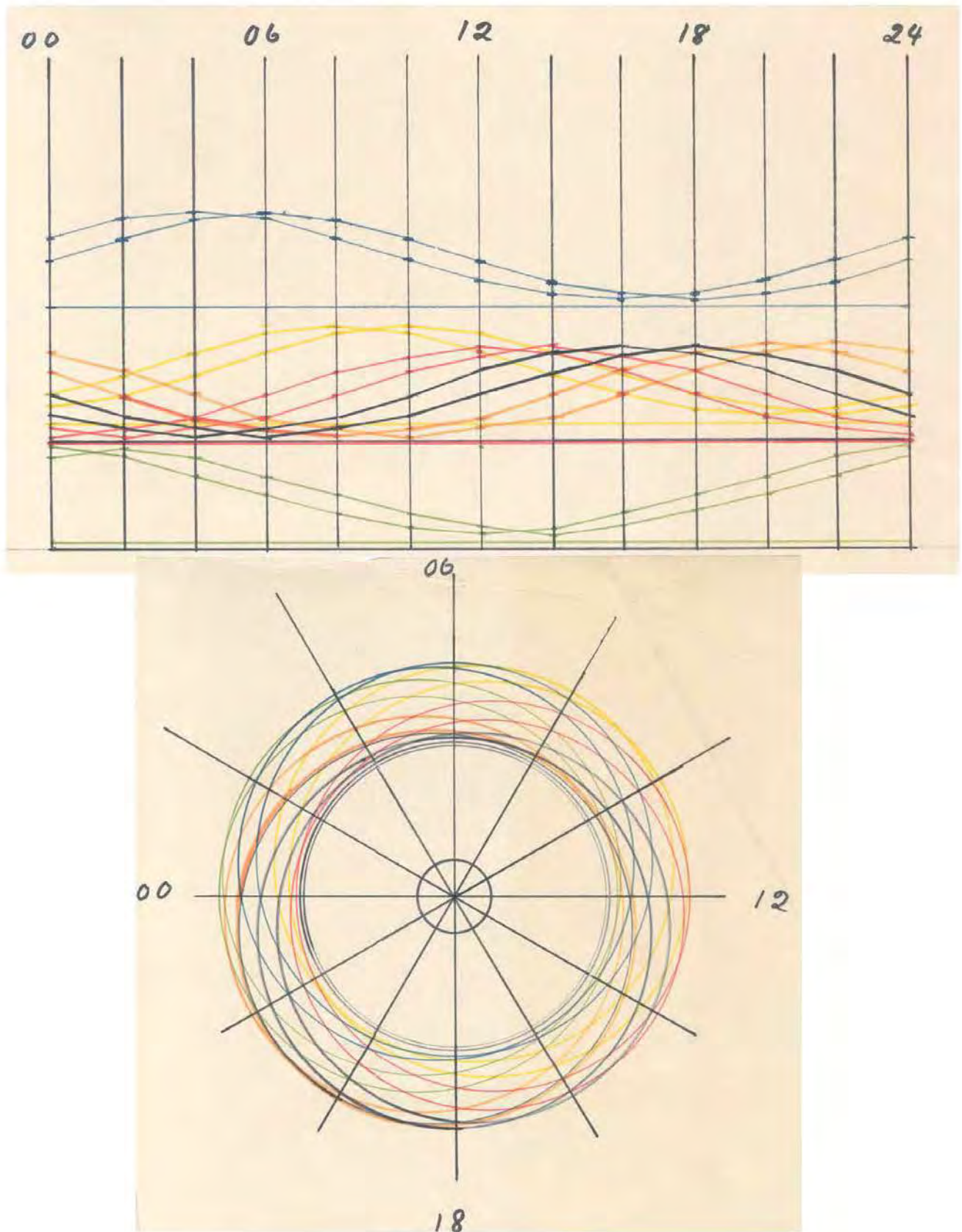

Energivariation under 24 timmar

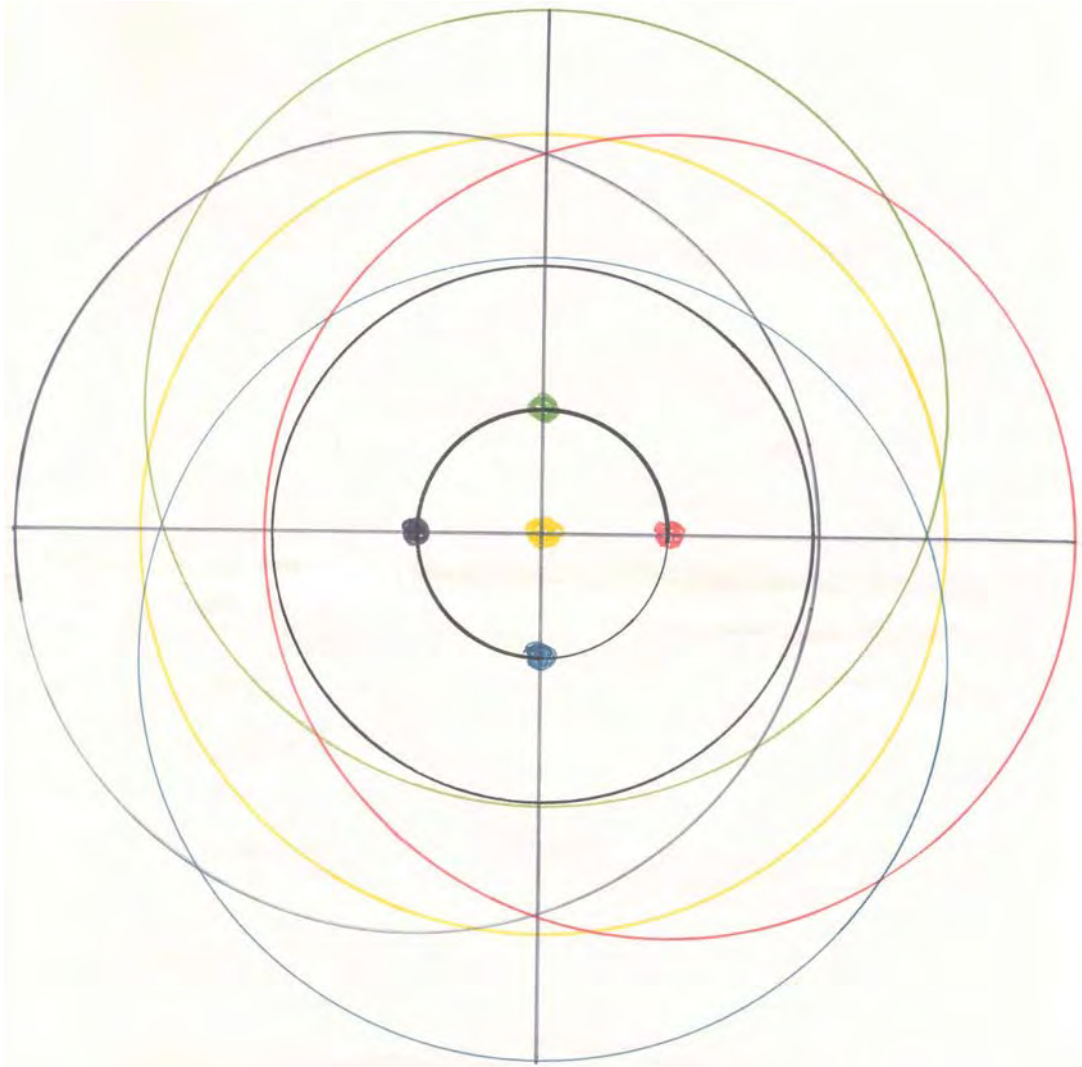

Energivariation under årstiderna

BioHarmonisering i Tiden

meridian YĪN årstid	lever 01-03	hjärta 11-13	Mc hjärta 19-21	mjälte 09-11	lunga 03-05	njurar 17-19
Vår	lever 1	hjärta 9	Mc. 9	mjälte 1	lunga 11	njurar 1
Sommar	lever 2	hjärta 8	Mc. 8	mjälte 2	lunga 10	njurar 2
Sommar-slut	lever 3	hjärta 7	Mc. 7	mjälte 3	lunga 9	njurar 3
Höst	lever 4	hjärta 4	Mc. 5	mjälte 5	lunga 8	njurar 7
Vinter	lever 8	hjärta 3	Mc. 3	mjälte 9	lunga 5	njurar 10
meridian YÁNG årstid	galla 23-01	tunntarm 13-15	Tr-värmare 21-23	mage 07-09	tjocktarm 05-07	urinblåsa 15-17
Höst	galla 44	tunntarm 1	Tr värmare 1	mage 45	tjock-tarm 1	urinblåsa 67
Vinter	galla 43	tunntarm 2	Tr värmare 2	mage 44	tjock-tarm 2	urinblåsa 66
Vår	galla 41 galla 40	tunntarm 3 tunntarm 4	Tr värmare 3 Tr värmare 4	mage 43 mage 42	tjock-tarm 3 tjock-tarm 4	urinblåsa 65 urinblåsa 64
Sommar	galla 38	tunntarm 5	Tr värmare 6	mage 41	tjock-tarm 5	urinblåsa 60
Sommar-slut	galla 34	tunntarm 8	Tr värmare 10	mage 36	tjock-tarm 11	urinblåsa 40

Livets utstrålning genom BioRadiance®

	Åkomma	1:a beh.	2:a beh.	3:dje beh.	4:de beh. osv.
Muskel	1 spänning	20 + 50	20 + 51	20 + 50	20 + 30
	2 inflammation	20 + 40	20 + 50	20 + 50 + 30	20 + 30
	3 sträckning	20 + 50 el 51	20 + 50 el 51	20 + 50 el 51 + 30	20 + 30
	4 stukning	20 + 50 el 51	20 + 51	20 + 50 el 51 + 30	20 + 30
	5 slag	20 + 40 el 50	20 + 51	20 + 40 el 50 + 30	20 + 30
	6 blodsutgjutelse	20 + 40	20 + 40 el 50	20 + 30	20 + 30
	7 svullnad	20 + 40 + 30	20 + 40 el 50	20 + 40 + 30	20 + 30
	8 förebyggande	20 + 30	20 + 30	20 + 30	20 + 30
Leder	1 inflammation	(20) + 40	(20) + 41	(20) + 41	-
	2 reumatism	(20) + 40	(20) + 50	(20) + 50 el 51	(20) + 50 el 51
Knä	1 vätskeansamling	20 + 40	20 + 40	20 + 50 el 51	20 + 30
	2 ledbandsskada	20 + 30	20 + 30	20 + 30	20 + 30
Armbåge	1 vätskeansamling	20 + 40	20 + 40	20 + 40	(20) + 30
	2 tennisarmbåge	20 + 40 el 50	20 + 40 el 50	20 + 30	(20) + 30
Sår	1 blödande	40	-	-	-
	2 skavsår	40	20 + 30	-	-
	3 operationssår	20 + 30	20 + 31	20 + 30	20 + 30
Brännskada	1 före blåsbildn.	40	-	-	-
	2 efter blåsbildn.	40 el 50	40 så länge infl.	20 + 30	20 + 31
	3 sår ej infl.	20 + 30	20 + 31	20 + 31	20 + 31
	4 ärr	20 + 30	20 + 31	20 + 31	20 + 31
Hud	1 Acne aktiv inflammerad	40	40	40 + 51	20 + 40
	2 acne "gammal"	20 + 30	20 + 30	20 + 30	20 + 30
	3 eksem	20	20	20	20
	4 rynkor	20 + 30	20 + 30	20 + 30	20 + 30